

Urindiagnostik

Sammelurin während der Sammelperiode kühl und lichtgeschützt lagern. Urin gut mischen und 2x 10 ml in Urinröhrchen überführen! Eine Patientenanleitung oder eine Anleitung für die Urinröhrchen kann angefordert werden unter 0471 98 29 0.

Die Sammelmenge auf dem Überweisungsschein vermerken! Siehe auch Präanalytik Untersuchungsmaterial

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
17-Hydroxycorticoide'		<input type="text"/>				kA
		10 ml 24h-Urin	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich	
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
5-HIES (Hydroxyindolessigsäure)'		<input type="text"/>				kA
		10 ml 24h-Urin	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 Tage vor Beginn der Sammelperiode keine Zufuhr von Salicylaten, Paracetamol, Obst, Nüssen, Gemüse. Angabe der Sammelmenge erforderlich	
zuletzt geändert am: 18.03.2024						

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.

Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Analyt	Methode	Material		Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
		ohne Zusatz	mit HCL	ohne Zusatz	mit HCL		
Albumin	Turbidimetrie	<input type="text" value="5 ml Urin"/>				Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	7 Tage
		<input type="text" value="5 ml 24h-Urin"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
zuletzt geändert am: 31.05.2021							
Albumin-Kreatinin-Quotient	berechnet	<input type="text" value="5 ml Urin"/>				Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	
		<input type="text" value="5 ml 24h-Urin"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
zuletzt geändert am: 31.05.2021							
alpha-2-Makroglobulin'		<input type="text" value="5 ml Urin"/>					7 Tage
		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
zuletzt geändert am: 31.05.2021							
Aluminium'		<input type="text" value="2 ml Urin"/>				Verwendung von Vacutainermonovetten (BD) nicht möglich. Hier bitte geeignete Urin-Monovette (Sarstedt).	4 Wochen
		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
zuletzt geändert am: 26.03.2024							
Aminosäuren'		<input type="text"/>				Angabe der Sammelmenge erforderlich	7 Tage
		<input type="text" value="5 ml 24h-Urin"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
zuletzt geändert am: 31.05.2021							

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.

Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Urindiagnostik

U 2

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Ammoniak'		<input type="text"/>				< 1 Tag
		5 ml 24h-Urin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich	
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Amylase		5 ml Urin				1 Tag
		5 ml 24h-Urin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	
Photometrie IFCC						
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Amylase-Isoenzyme'		2 ml Urin				kA
		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
beta-2-Mikroglobulin		5 ml Urin				< 1 Tag
		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAVE: Spontanurin, kein Morgenurin! Es ist auch möglich, dass der Patient die Urinprobe direkt im Labor lässt. VS tiefgefroren!	
zuletzt geändert am: 31.05.2021						

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Blei'		10 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		7 Tage zuletzt geändert am: 31.05.2021
Brom`		<input type="text"/> 10 ml 24h-Urin	x	<input type="text"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich	kA zuletzt geändert am: 31.05.2021
Buprenorphin' Norbuprenorphin (aktiver Metabolit)		5 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		7 Tage zuletzt geändert am: 31.05.2021
Cadmium'		2 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		7 Tage zuletzt geändert am: 17.07.2024
Calcium Photometrie		5 ml Urin 5 ml 24h-Urin	x	<input type="text"/>	Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	2 Tage bei RT zuletzt geändert am: 31.05.2021

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.
Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Calcium-Kreatinin-Clearance-Quotient	berechnet	<input type="text" value="1 ml Serum"/>			Es wird 24h-Urin und Serum benötigt Angabe der Sammelmenge erforderlich	zuletzt geändert am: 31.05.2021
		<input type="text" value="10 ml 24h-Urin"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Calcium-Kreatinin-Quotient	berechnet	<input type="text" value="1 ml Urin"/>			Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	2 Tage bei RT zuletzt geändert am: 31.05.2021
		<input type="text" value="5 ml 24h-Urin"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Chlamydia trachomatis DNA	PCR (Real Time)	<input type="text" value="siehe Hinweis"/>			5 ml Erststrahlurin	14 Tage zuletzt geändert am: 31.05.2021
		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Chlorid	ISE	<input type="text" value="5 ml Urin"/>			Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	14 Tage zuletzt geändert am: 31.05.2021
		<input type="text" value="5 ml 24h-Urin"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Chrom'		<input type="text" value="2 ml Urin"/>				7 Tage zuletzt geändert am: 17.07.2024
		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.

Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Urindiagnostik

U 5

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Citrat'		<input type="text"/>				k.A.
		10 ml 24h-Urin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich	
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Cortisol		<input type="text"/>				14 Tage
		5 ml 24h-Urin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich	
Synonym: freies Cortisol						
CMEIA						
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
delta-Aminolävulinsäure (d-ALA, d-ALS)'		<input type="text"/>				kA
		50 ml 24h-Urin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich	
zuletzt geändert am: 31.05.2021						

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.

Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Urindiagnostik

U 6

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Drogenscreening		10 ml Urin			<p>Opiate Nachweis 1-3 Tage Cannabinole einmaliger Konsum Nachweis 24-36 h, regelmäßiger Mißbrauch bis zu 4 Wochen Cocain Nachweis 1-3 Tage Amphetamine Nachweis 1-3 Tage Benzodiazepine Nachweis 1-3 Tage, Langzeiteinnahme 4-6 Wochen Barbiturate Nachweis 1-7 Tage Methadon 1-4 Tage</p> <p>Bei pos. Screening wird ein Bestätigungstest (Differenzierung) durchgeführt.</p>	2 Tage
	KIMS					zuletzt geändert am: 07.03.2024
EDDP'		20 ml Urin				5 Tage
(Methadon-Metabolit)						
						zuletzt geändert am: 27.11.2023
Fentanyl'		5 ml Urin				7 Tage
						zuletzt geändert am: 07.03.2024

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.

Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Urindiagnostik

U 7

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Formaldehyd (Ameisensäure)'		10 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		kA zuletzt geändert am: 31.05.2021
freie Leichtketten (kappa, lambda)		5 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		3 Tage Synonyme: Paraproteine, Bence-Jones-Proteine Turbidimetrie zuletzt geändert am: 08.01.2024
Galaktose'		<input type="text"/> 10 ml 24h-Urin	x	<input type="text"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich	kA zuletzt geändert am: 31.05.2021
Gesamteiweiß		5 ml Urin 5 ml 24h-Urin	x	<input type="text"/>	Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	7 Tage Turbidimetrie zuletzt geändert am: 31.05.2021
Glukose		5 ml Urin 5 ml 24h-Urin	<input type="text"/>	x	Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	< 1 Tag Photometrie zuletzt geändert am: 31.05.2021

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.

Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Urindiagnostik

U 8

Analyt	Methode	Material		Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
		ohne Zusatz	mit HCL	ohne Zusatz	mit HCL		
Harnsäure	Photometrie	<input type="text" value="5 ml Urin"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	< 1 Tag
		<input type="text" value="5 ml 24h-Urin"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
zuletzt geändert am: 31.05.2021							
Harnstoff	enzym. UV-Test	<input type="text" value="5 ml Urin"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	7 Tage
		<input type="text" value="5 ml 24h-Urin"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
zuletzt geändert am: 31.05.2021							
Hippursäure (Toluol-Metabolit)'		<input type="text" value="5 ml Urin"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		kA
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
zuletzt geändert am: 18.04.2024							
Histamin' Methylhistamin		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Histaminhaltige Nahrungsmittel (Rotwein, Käse, Sauerkraut etc.) sind zu meiden. Angabe der Sammelmenge erforderlich	1 Tag
		<input type="text" value="5 ml 24h-Urin"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
zuletzt geändert am: 31.05.2021							
Immunglobulin G'		<input type="text" value="1 ml Urin"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		< 1 Tag
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
zuletzt geändert am: 27.11.2023							

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.

Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Urindiagnostik

U 9

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Jod'		10 ml Urin			Parallele Bestimmung von Kreatinin im Urin sinnvoll	14 Tage
		10 ml Urin	x			
zuletzt geändert am: 27.11.2023						
Kalium		5 ml Urin			Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	< 1 Tag
		5 ml 24h-Urin	x			
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Katecholamine' (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin)					12 Std. vor Beginn der Sammelperiode keinen Alkohol, Tee, Kaffee, Nikotin. Die Katecholaminausschüttung beeinflussende Medikamente wenn möglich 8 Tage vor der Untersuchung absetzen. Zum Transport Urin lichtgeschützt (mit Alufolie umwickeln) versenden, die Gesamturinmenge notieren!	5 Tage
		10 ml 24h-Urin		x		
zuletzt geändert am: 18.03.2024						

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.

Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Urindiagnostik

U 10

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Kreatinin	Photometrie	5 ml Urin			Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	6 Tage
		5 ml 24h-Urin	x			
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Kreatinin-Clearance	berechnet	1 ml Serum			Parallele Abnahme von Serum, Körpergewicht und Größe angeben Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	4 Tage
		10 ml 24h-Urin	x			
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Kupfer'		5 ml Urin			Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	7 Tage
		5 ml 24h-Urin	x			
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
LSD (Lysergsäurediethylamind)'		10 ml Urin				< 1 Tag
zuletzt geändert am: 07.03.2024						

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.
Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Magnesium		<input type="text"/>				3 Tage
		5 ml 24h-Urin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich	
	Photometrie					zuletzt geändert am: 31.05.2021
Mangan'		5 ml Urin				7 Tage
		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						zuletzt geändert am: 19.07.2024
Metanephrin'		<input type="text"/>				< 1 Tag
	Normetanephrin	10 ml 24h-Urin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich.	
						zuletzt geändert am: 18.03.2024
Methaqualon'		10 ml Urin				7 Tage
		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
						zuletzt geändert am: 31.05.2021
Methylhippursäure (Xylol-Metabolit)'		5 ml Urin				kA
		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Synonym: MHS					zuletzt geändert am: 18.04.2024

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.
 Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Myoglobin'		5 ml Urin				7 Tage
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Natrium		5 ml Urin			Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	14 Tage
		5 ml 24h-Urin	x			
ISE						zuletzt geändert am: 31.05.2021
Neisseria gonorrhoeae DNA		siehe Hinweis			5 ml Erststrahlurin Mastermix-Röhrchen	14 Tage
PCR (Real Time)						zuletzt geändert am: 31.05.2021
Neopterin'		2 ml Urin			Probe lichtgeschützt versenden	7 Tage
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Nickel'		10 ml Urin				7 Tage
zuletzt geändert am: 17.07.2024						

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
NMP-22'		5 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	wird nicht mehr durchgeführt	kA zuletzt geändert am: 31.05.2021
o-Kresol'		5 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		zuletzt geändert am: 31.05.2021
Osmolalität'		5 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		4 Tage zuletzt geändert am: 31.05.2021
Oxalsäure'		<input type="text"/> 10 ml 24h-Urin	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich	7 Tage zuletzt geändert am: 31.05.2021
Oxycodon'		10 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		7 Tage zuletzt geändert am: 07.03.2024

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.
Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Pantothensäure' (Coenzym A)		<input type="text"/>				7 Tage
		2 ml Urin	x	<input type="text"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich	
						zuletzt geändert am: 31.05.2021
Pentachlorphenol (PCP)'		10 ml Urin				7 Tage
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
						zuletzt geändert am: 31.05.2021
Pentoxifyllin'		10 ml Urin				kA
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
						zuletzt geändert am: 31.05.2021
Phencyclidin'		20 ml Urin				7 Tage
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
						zuletzt geändert am: 07.03.2024
Phenol'		10 ml Urin				7 Tage
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
						zuletzt geändert am: 31.05.2021

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.
 Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Phenprocoumon'		5 ml Vollblut				kA
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Phenylbutazon'		10 ml Urin				kA
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Phosphat		5 ml Urin				1 Tag
		5 ml 24h-Urin	x		Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	
	Photometrie					
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Porphobilinogen'						kA
		10 ml 24h-Urin	x		lichtgeschützt versenden Angabe der Sammelmenge erforderlich	
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Porphyrine'						3 Tage
		20 ml 24h-Urin	x		lichtgeschützt versenden ggf. Porphobilinogen, delta-Aminolävulinsäure Angabe der Sammelmenge erforderlich	
zuletzt geändert am: 31.05.2021						

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.

Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Urindiagnostik

U 16

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Pregabalin'		1 ml Urin				k.A.
zuletzt geändert am: 18.07.2024						
Pregnantriol'						3 Tage
		10 ml 24h-Urin		x	Angabe der Sammelmenge erforderlich	
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Propoxyphen		10 ml Urin				7 Tage
zuletzt geändert am: 20.08.2024						
Propyphenazon'		10 ml Urin				kA
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Protein-Kreatinin-Quotient		5 ml Urin				
		5 ml 24h-Urin	x		Beim Sammelurin Angabe der Sammelmenge erforderlich	
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
berechnet						

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.

Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Pyrethroide / - metaboliten'		30 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		kA zuletzt geändert am: 31.05.2021
Pyridinolin, Deoxypyridinolin' Biochemische Marker des Knochenstoffwechsels Synonym: Crosslinks		2. Morgenurin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		< 1 Tag zuletzt geändert am: 27.11.2023
Pyruvat (Benztraubensäure)'		<input type="text"/> 10 ml 24h-Urin	x	<input type="text"/>	Angabe der Sammelmenge erforderlich	1 Tag zuletzt geändert am: 31.05.2021
Quecksilber'		2 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		7 Tage zuletzt geändert am: 31.05.2021
Selen'		10 ml Urin <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		7 Tage zuletzt geändert am: 19.07.2024

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.
Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Serotonin'		<input type="text"/>			Angabe der Sammelmenge erforderlich	kA
		10 ml 24h-Urin	<input type="text"/>	x		
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Silber'		10 ml Urin				kA
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Thallium'		20 ml Urin				7 Tage
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Tramadol'		10 ml Urin				7 Tage
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
zuletzt geändert am: 07.03.2024						
Transferrin'		5 ml Urin				kA
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
zuletzt geändert am: 31.05.2021						

Abkürzungen sind unter Präanalytik - Abkürzungen zu finden.
 Fremdleistungen sind gekennzeichnet mit ', Hinweis zu Unterauftragnehmer siehe Präanalytik - Unterauftragnehmer.

Analyt	Methode	Material	Sammelurin		Hinweise	Stabilität bei 2-8°C
			ohne Zusatz	mit HCL		
Vanillinmandelsäure (VMS)'		<input type="text"/>				5 Tage
		10 ml 24h-Urin	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Medikamente, sofern möglich ca. 1 Woche vorher absetzen, ca. 12 Std. vorher Kaffee, Tee, Bananen, Käse, Nüsse und Nikotin vermeiden. Zur weiteren Abklärung erhöhter VMS-Werte ggf. Katecholamine bestimmen Angabe der Sammelmenge erforderlich
zuletzt geändert am: 18.03.2024						
Vitamin H'		2 ml Urin	<input type="text"/>	<input type="text"/>		kA
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Synonym: Biotin						
zuletzt geändert am: 31.05.2021						
Zink'		10 ml Urin				7 Tage
		10 ml 24h-Urin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		Angabe der Sammelmenge erforderlich
zuletzt geändert am: 31.05.2021						